

Hinweise zur Anwendung

WILBERT SuperSafe

Hinweis: Den Spendereimer vor der Befüllung von außen desinfizieren!



Hände desinfizieren und Handschuhe anziehen. Das Bruchsiegel entfernen.



Öffnen Sie den Deckel des Einwegspenders.



Gebrauchsfertige Lösung spiralförmig von der Mitte nach außen über die Vliesrolle geben.



Vliestuch von unten durch die Entnahmeöffnung führen. Verwerfen Sie das erste Tuch.



Verschließen Sie den Deckel und die Entnahmeöffnung sorgfältig. Das System ist nach 30 Minuten einsatzbereit.



Füllen Sie das vorgesehene Feld auf dem Spender vollständig aus. Standzeit: Mindestens 28 Tage.



Nach Ablauf der Standzeit oder vollständigem Verbrauch den Einwegspender verwerfen.

Empfehlung für Desinfektionsmittelmenge:

WILBERT SuperSafe 70:	1,0 - 1,5 Liter
WILBERT SuperSafe 100:	2,5 - 3,0 Liter
WILBERT SuperSafe 200:	2,5 - 3,0 Liter



Wilbert Hygiene GmbH

Deutschland: Dorfstraße 52, D-85232 Bergkirchen, Tel. +49 89 324 50 624, info@wilbert-hygiene.de, www.wilbert-hygiene.de
Österreich: Schweizergasse 42, A-9900 Lienz, Tel. +43 48 52 63 684, info@wilbert-hygiene.at, www.wilbert-hygiene.at